



GIPS- ISOLIERUNG

Stand:220517

Inhalt: e 250 ml

REF 000 928 Flasche + Pumpsprühaufsatz

Inhalt: e 1000 ml

REF 000 929 Nachfüllflasche mit 1000ml

M+W Gips-Isolierung, mit gelblicher Eigenfarbe, ist ein sehr gutes Trennmittel für alle Gipse. Die Gipsoberfläche wird unter voller Benetzung eingesprüht, kurz einwirken lassen, und eventuelle Überschüsse mit Druckluft abblasen oder unter Wasser kurz abspülen. M+W Gips-Isolierung trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche.

Sicherheitshinweise:

H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H 315 Verursacht Hautreizungen. H 319 Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.



Achtung

M+W Dental

 Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88